

Bestell-Nr. XS1810


Detektor-
halterung
nur ca.
400 g

VersariX - das portable Halterungssystem für Röntgendetektoren

VersariX ist DER portable Detektorhalter für Röntgenuntersuchungen an ungewöhnlichen Orten, wie beispielsweise Privatwohnungen, Seniorenheime, Sanitätszelte oder Schiffe etc. In diesen beengten Räumlichkeiten ist es meist problematisch, ein Fahrstativ zum Halten des Röntgendetektors zu installieren. Ebenso ist der Transport eines klappbaren Fahrstativs für viele Einsätze aufgrund des Gewichtes und des Platzbedarfs unvorteilhaft.

Hier kommt **VersariX** ins Spiel. Er wiegt nur ca. 400 Gramm und kann überall befestigt werden, zum Beispiel an Zimmer- oder Schranktüren, Wänden, Bäumen o. ä. Der stabile Haken, an dem der Röntgendetektor eingehängt wird, ist nahezu stufenlos höhenverstellbar. Professionell und bequem können alle Aufnahmen vom Schädel, über Thorax bis hin zum Fuß erstellt werden.

VersariX ist eine Eigenentwicklung von Oehm und Rehbein und wird zu 100% in Deutschland produziert.

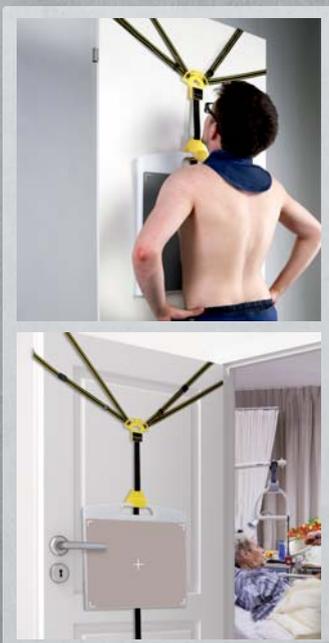

VersariX
Portable flat panel holder

Vorteile

Ideal: mit nur 400 g sehr leicht und passt in jede Tasche [Maße für den Transport: 20 x 15 x 8 cm]

Flexibel: sehr vielseitig einsetzbar und für alle Röntgenaufnahmen im Stehen oder Sitzen geeignet – mit dem nahezu stufenlos höhenverstellbaren Detektor können selbst Spezialaufnahmen in engen und verwinkelten Räumlichkeiten unkompliziert und fachgerecht erstellt werden

Hygienisch: leicht zu reinigen und desinfektionsmittelbeständig

Vielfältig: Breites Einsatzspektrum für Homecare, NGOs und medizinische Einrichtungen mit beengten Räumlichkeiten [Sanitätszelte, Bordhospital, etc.]

Made in Germany: Eigenentwicklung von Oehm und Rehbein – alle Komponenten werden in Deutschland produziert

Durchdacht: es stehen 3 Befestigungsmöglichkeiten zur Auswahl für eine sichere Befestigung an Türen, Haken, Nägeln, Ästen, etc.






Universelle Befestigungsmöglichkeiten

VersariX ist für alle Röntgendetektoren mit oder ohne Schutzhülle geeignet und kann mit der speziellen Schlaufenvorrichtung aus strapazierfähigem Polypropylen an allen Türen befestigt werden. Die pulverbeschichtete Halterung gewährleistet ebenfalls eine sichere Aufhängung an Haken, Schrauben, Ästen und anderen geeigneten Möglichkeiten, die einen sicheren Halt garantieren. Die Einstellung der Detektorhöhe ist auch mit eingehängtem Röntgendetektor leicht möglich.

1. Schlaufenaufhängung für Türen [nicht auftragend - Tür kann während des Röntgenvorganges geschlossen werden]
2. Aufhängung an in der Wand befestigten Schrauben, Haken etc.
3. Aufhängung an Schranktüren etc. über mitgelieferten Haken

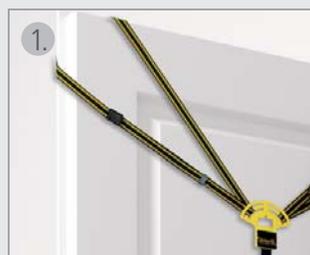

Ausführliche Informationen zum Detektorhalterung **VersariX** für die maritime Wirtschaft




Ausführliche Informationen zum Detektorhalterung **VersariX** für mobile Röntgendienstleister



Ausführliche Informationen zum Detektorhalterung **VersariX** für militärische Sanitätsdienste

Einsatzgebiete

- **Mobile medizinische Einrichtungen**
 - für die Gesundheitsvorsorge in Entwicklungsländern
 - für Feldlazarette
 - für die Notfallmedizin beim Katastrophenschutz in container- oder zeltbasierten Ambulanz- oder Rettungssystemen
- **Homecare-Bereich**
 - für Seniorenheime
 - für Privatwohnungen
- **Stationäre medizinische Einrichtungen** für die Notfallmedizin in Sanitätsstützpunkten in schwer erreichbaren Gebieten
 - auf Kreuzfahrtschiffen
 - Megayachten
 - Forschungsschiffen
 - Ölplattformen usw.

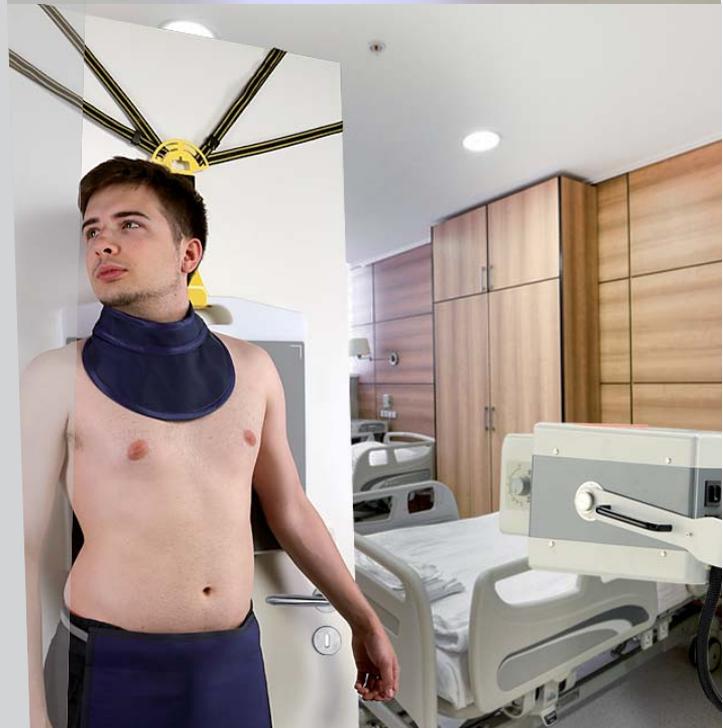

Produktbeschreibung & Technische Daten

Material & Gewicht

Spezialriemen aus kevlarverstärktem Neopren, pulverbeschichteter Edelstahl/Aluminium, strapazierfähige Polypropylen-Gurte, ca. 400 g

Höhenverstellbarkeit des Detektors

- Mindestens 150 cm
- Der stabile Haken aus pulverbeschichtetem Edelstahl, an dem der Röntgendetektor eingehängt wird, ist nahezu stufenlos höhenverstellbar
- Für alle Aufnahmen über Schädel, Thorax bis hin zum Fuß



Zugbelastung am Haken

bis 10 kg

Betriebstemperatur

- 10 bis +45° C

Maße für Transport im Transportbeutel

Ca. 20 x 15 x 8 cm

Maße Umverpackung

Ca. 22 x 16 x 10 cm

Für den Transport zu Ihren Einsätzen können Sie zwischen einer stabilen Packschachtel und einem platzsparenden Stoffbeutel (inklusive) wählen.



Garantie

2 Jahre

Der Herausgeber ist um Richtigkeit und Aktualität der bereitgestellten Informationen bemüht. Die Angaben über technische Inhalte basieren jedoch auf den aktuellen Erkenntnissen und unterliegen der ständigen Weiterentwicklung. Der Herausgeber übernimmt deshalb allein auf Basis dieser Werbedrucksache keine Gewähr für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der bereitgestellten Informationen.

Alle dargestellten Logos, Bilder und Grafiken sind Eigentum der entsprechenden Firmen und unterliegen dem Copyright der entsprechenden Lizenzgeber. Sämtliche auf diesen Seiten dargestellten Fotos, Logos und Texte, die Eigenentwicklungen von uns sind oder von uns aufbereitet wurden, dürfen nicht ohne unser Einverständnis kopiert oder anderweitig genutzt werden. Alle Rechte vorbehalten.

Oehm und Rehbein

www.oehm-rehbein.de | X-perts in X-ray



Oehm und Rehbein GmbH, 18057 Rostock, Germany, Neptunallee 7c
Tel. +49 381 36 600 500, Fax +49 381 36 600 555
www.oehm-rehbein.de, info@oehm-rehbein.de

Info-Hotline: +49 381 36 600 600

